

# RAINBOW ®

## RAINBOW PIGLET (5 штук/уп)

НАБОРЫ ДЛЯ  
ОБНАРУЖЕНИЯ  
РАЗЛИЧНЫХ  
ПАТОГЕНОВ  
В ФЕКАЛИЯХ  
ПОРΟΣЯТ



КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ:



1

■ Возьмите фекалии непосредственно из прямой кишки поросенка. Если фекалии жидкие, возьмите их мерной ложкой.



2

■ Если фекалии твердые, удалите лишнее количество с помощью шпателя.



3

■ Положите фекалии в жидкость маленькой пробирки, называемой пробиркой для проб.



4

■ Встряхните пробирку с образцом, чтобы хорошо перемешать.



5

■ Постучите пробиркой с образцом о твердую поверхность, чтобы вся жидкость собралась на дне пробирки.



6

■ Разорвите алюминиевый пакет по надрезу. После того, как устройство будет извлечено из пакета, его стабильность непродолжительна, особенно во влажной среде.



7

Вставьте пробирку с образцом в пробирку с тест-полоскам

[www.helicon.ru](http://www.helicon.ru)

Компания Хеликон – официальный дистрибьютор Bio-X Diagnostics (Бельгия) на территории РФ и Казахстана.



8



9




10

■ Закрутите крышку пробирки с тест-полосками. Вы должны услышать два отдельных щелчка при перфорации верхней и нижней перегородок пробирки с пробой. Оставьте устройство **вертикально на ровной поверхности** и подождите 10 минут. Жидкость, содержащаяся в пробирке для проб, перемещается в пробирку с тест-полосками и медленно мигрирует по тест-полоскам.


■ Иногда, особенно когда образец не гомогенизирован, миграция жидкости может остановиться на одной или нескольких полосках. В этом случае постучите нижним концом пробирки о твердую поверхность, чтобы миграция началась снова.

Через 10 минут прочитайте результаты, используя рисунок 11.

■ Для интерпретации *Clostridium perfringens* используйте рисунок 12.

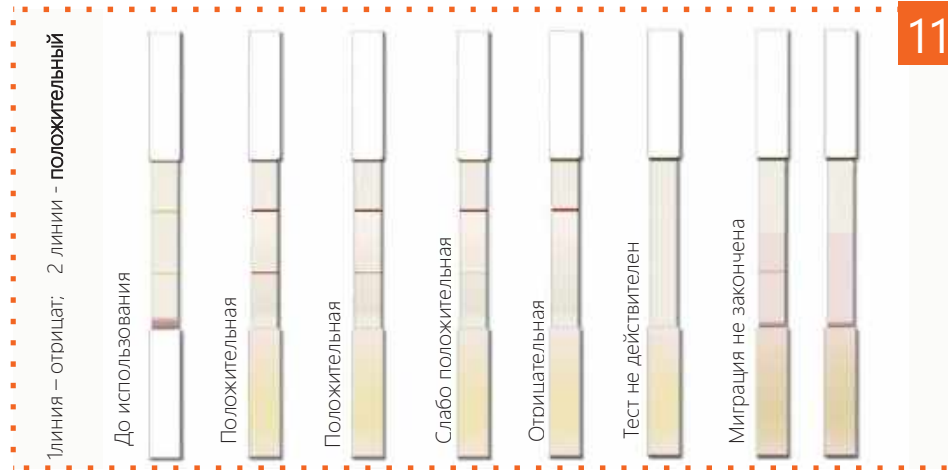

11

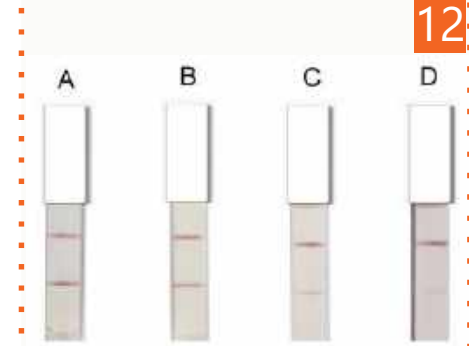

12

A)  $10^9$  КОЕ/г фекалий    C)  $10^7$  КОЕ/г фекалий  
B)  $10^8$  КОЕ/г фекалий    D)  $< 10^6$  КОЕ/г фекалий

| Nom du produit | Rotavirus | E.coli F4 (K88) | E.coli F5 (K89) | E.coli F18 | E.coli F41 | Clostridium perfringens | Clostridium difficile | Cryptosporidium parvum |
|----------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|
| BIO K 351      | ×         | ×               | ×               | ×          | ×          | ×                       | ×                     | ×                      |
| BIO K 361      |           | ×               | ×               | ×          | ×          |                         |                       |                        |
| BIO K 372      | ×         | ×               |                 | ×          |            | ×                       |                       |                        |
| BIO K 374      | ×         | ×               | ×               | ×          | ×          | ×                       | ×                     |                        |
| BIO K 393      | ×         | ×               |                 |            |            | ×                       |                       |                        |

### Меры предосторожности

- Храните наборы в сухом месте при комнатной температуре.
- Надевайте перчатки во время анализа.
- Анализируемый образец не должен быть слишком концентрированным. Не кладите фекалий больше, чем 1 ложку.
- Утилизируйте набор в соответствии с законодательством вашей страны.

[www.helicon.ru](http://www.helicon.ru)

Компания Хеликон – официальный дистрибьютор Bio-X Diagnostics (Бельгия) на территории РФ и Казахстана.